

Nasolin Flustopper, nenäsuihke



KÄYTTÖTARKOITUS: Nasensuihketta käytetään helpottamaan ja hoitamaan nuhan oireita. Tuote auttaa pysäyttämään flunssan etenemisen sekä hoitaa nenän ärtyneitä limakalvoja. Tuote luo viruksille epäsuotuisan ympäristön sieraimessa ja muodostaa nenän pintasoluille suojaavan kalvon. Täten tuote estää virusten lisääntymistä ja taudin etenemistä. Lisäksi tuote huuhdoo sieraimia ja samalla flunssanaiheuttajavirukset huuhoutuvat pois. Tuote edistää myös liman eritystä ja lisää liman irtoamista sieraimesta.

AINESOSAT: Dekspantenoli, hydroksipropyylimetyylliseluloosa, butaanidihappo, L-pyroglutamiinihappo, dinatriumsukkinaatti, polysorbaatti 80, sukraloosi, fenyylityylialkoholi, eukalyptusöljy, vesi. 15 ml

KÄYTTÖOHJE: Ravista pulloa ennen käyttöä. Poista suojakorkki (**Kuva 1**). Laita etu- ja keskisormi suihkepumpun siivekkeelle sekä peukalo pullon pohjaa vasten (**Kuva 2**). Paina suihkepumpua alaspäin ja sumuta pari kertaa esim. talouspaperia vasten. Tarpeen vaatiessa niistä nenä. Tämän jälkeen annosteletuotetta ohjeen mukaisesti.

Pidä pulloa **Kuvan 3**. osoittamalla tavalla pystyasennossa ja aseta suihkepullon kärki toiseen sieraimeen. Hengitä kevyesti sisään ja suihkauta tuotetta kolme kertaa eri puolelle sierainta. Suihkauta tuotetta myös toiseen sieraimen. Käytön jälkeen kuivaa suihkeosa esim. talouspaperilla ja aseta muovikorkki takaisin paikoilleen.

Aloita tuotteen käyttö flunssan ensioireiden yhteydessä (esim. nenän tukkoisuus, kutiava kurkku).

Vain henkilökohtaiseen käyttöön. Nenäsuihke sopii käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana.

Ei alle 12-vuotiaalle. Käytön jälkeinen lisääntynyt liman eritysi sieraimessa on normaalia.

ANNOSTUS: 3 suihkausta molempiin sieraimiin 4 kertaa päivässä neljän tunnin välein.

Käytä tuotetta vielä kaksi päivää oireiden häviämisen jälkeen.

HAITTAVAIKUTUKSET: Nenäsuihke voi aiheuttaa nenän limakalvojen ärtymistä tai lievää nenäverenvuotoa. Mikäli hengität voimakkaasti sisään tuotteen käytön yhteydessä, tuotetta saattaa valua nieluun. Tästä voi aiheutua tilapäisiä hengitysvaikeuksia. Tuotteen ohjeen mukaisella käytöllä ei ole odotettavissa muita haittavaikutuksia tai yhteisvaikutuksia lääkevalmisteiden kanssa. Mikäli olet ylittänyt suositellun annostuksen ja sinulle ilmaantuu haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin.

SÄILYTYS: Säilytä pullo suljettuna lämpötilassa +5–25 °C. Suojaa tuote auringonvalolta.

VAROITUKSET:

- Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen jollekin tuotteen ainesosalle. Jos tuote aiheuttaa allergiaoireita, tulee sen käyttö lopettaa ja ottaa yhteyttä lääkäriin.
- Tuotetta ei tule käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Ei lasten ulottuville ja näkyville.
- Vältä tuotteen joutumista silmiin.
- Älä käytä tuotetta, jos pullo tai suihkeosa on rikki.
- Käytä varoen immuunipuutostiloissa.
- Jos muita haittavaikutuksia ilmenee tai oireet pahenevat käytön aikana, keskeytä tuotteen käyttö tai ota yhteys lääkäriin.
- Jos oireet kestävät yli viikon, ota yhteys lääkäriin.
- Voit haluta lukea tämän pakkaukselosteen uudelleen, joten säilytä se kunnes olet lopettanut tuotteen käytön.

MARKKINOIJA: Orion Oyj, Orionintie 1, 02101 Espoo

VALMISTAJA: Pharmia Oy, Kalliotie 2, 04360 Tuusula, Suomi

PAKKAUSMERKINTÖJEN KUVAUS



Suojaus auringonvalolta



Eränumero



Viimeinen käyttöpäivämäärä



Lue pakkaukseloste ennen käyttöä




Lue varoitukset pakkaukselosteesta




Lääkinnällinen laite



Valmistaja

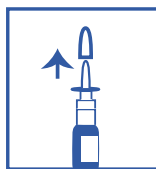

Kuva 1.

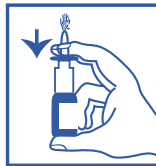

Kuva 2.



Kuva 3.

A-0093200-01-3

1.3.2021

Nasolin Flustopper, nässpray



ANVÄNDNINGSAÄNDAMÅL: Denna nässpray är avsedd för lindring och behandling av symtom på snuva. Nässprayen hjälper till att stoppa framskridandet av en förkylning och ger samtidigt vård för irriterade näslemhinnor. Denna produkt gör att omgivningen i näsborrarna blir ogynnsam för virus, och dessutom bildar sprayen en skyddande hinna på näsans ytceller. På så sätt förhindrar produkten tillväxten av virus samt förkylningens framskridande. Nässprayen sköljer också näsborrarna, vilket spolat bort förkylningsvirus ur näsan. Dessutom befrämjar produkten slemutsöndringen och gör att slem lättare kommer bort ur näsborrarna.

INGREDIENSER: Dexpantenol, hydroxipropylmetylcellulosa, butandisyra, L-pyroglutaminsyra, dinatriumsuccinat, polysorbat 80, sukralos, fenyletylalkohol, eukalyptusolja, vatten. 15 ml

BRUKSANVISNING: Skaka flaskan före bruk. Ta av skyddshättan. (**Bild 1**). Greppa flaskan med pek- och långfingret på spraypumpens krage och tummen mot botten av flaskan (**Bild 2**). Tryck ned pumpen och spraya ett par gånger mot t.ex. ett hushållspapper. Snyt näsan om så behövs, och dosera sedan sprayen enligt vana instruktioner.

Håll flaskan upprätt som på **Bild 3**, och placera sprayflaskans spets i den ena näsborren. Andas lätt in och spraya tre gånger mot olika delar av näslemhinnan. Upprepa sedan för den andra näsborren. Torka slutligen av sprayflaskans spets med t.ex. ett hushållspapper och sätt tillbaka skyddshättan.

Börja använda nässprayen genast vid de första tecknen på en annalkande förkylning (såsom nästäppa eller en kittlande känsla i halsen).

Varje sprayflaska ska användas av endast en person. Nässprayen lämpar sig för användning också i samband med graviditet och amning. Ej för barn under 12 år. En ökad slemutsöndring ur näsborrarna efter doseringen är normalt.

DOSERING: 3 sprayer i vardera näsborren 4 gånger per dag var fjärde timme. Använd nässprayen i ytterligare 2 dagar efter att symptomen gått över.

BIVERKNINGAR: Nässprayen kan orsaka irritation i näslemhinnorna eller lindriga näsblödningar. Vid kraftig inandning i samband med att produkten används kan en del av produkten rinna ut i svalget. Detta kan orsaka tillfälliga andningsbesvär. Vid användningen enligt instruktionerna har produkten inga andra förväntade biverkningar eller interaktioner med läkemedel. Ifall du har överskridit den rekommenderade dosen och upplever biverkningar, kontakta läkare.

FÖRVARING: Förvara sprayflaskan väl tillsluten vid +5 - 25 °C och i skydd mot solljus.

VARNINGAR:

- Använd inte denna nässpray om du är allergisk mot något av innehållsämnen. Om produkten orsakar allergiska symtom, sluta använda den och kontakta läkare.
- Denna produkt får inte användas efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Undvik att få preparatet i ögonen.
- Använd inte nässprayen om flaskan eller spraypumpen är skadade.
- Försiktighet bör iaktas vid användning i samband med immunbristtillstånd.
- Om andra biverkningar än de tidigare nämnda uppkommer eller om symptomen förvärras trots behandlingen med denna spray, avbryt användandet av sprayen eller kontakta läkare.
- Kontakta läkare om symptomen fortsätter i mer än en vecka.
- Du kan kanske behöva återkomma till denna bipacksedel. Spara den därför tills du slutat använda nässprayen.

MARKNADSFÖRS AV: Orion Oyj, Orionvägen 1, 02101 Esbo

TILLVERKARE: Pharmia Oy, Kalliotie 2, 04360 Tusby, Finland

FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ FÖRPACKNINGEN



Förvarings-
temperatur



Bör skyddas
mot solljus



Satsnummer



Sista
användningsdatum



Läs bipacksedeln
före användning



Bekanta dig med
varningarna i
bipacksedeln



Medicinteknisk
produkt



Tillverkare

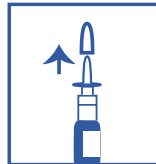


Bild 1.



Bild 2.



Bild 3.

1.3.2021

**ORION
PHARMA**