

KÄYTTÖOHJE

Remo-Wax® korvatipat

Pakkaukset

Remo-Wax korvatipat 10 ml
Toimenpidepakkaus: Remo-Wax korvatipat 10 ml, sisältää korvapumpun

Käyttötarkoitus

Remo-Wax korvatipat liuottavat korvan vahatulppia.

Älä käytä Remo-Wax korvatippoja, jos

- korva on tulehtunut tai kipeä
- korvasta vuotaa eritettä
- tärykalvo on vaurioitunut, puhjennut tai puhkaistu (esim. tärykalvoputki)
- olet allerginen (yliherkkä) jollekin Remo-Wax korvatippojen sisältämälle aineelle.

Eritisryhmät

Jos sinulla on koordinaatiovaikeuksia, liikehäiriöitä tai käsien vapinaa, pyydä jotakin toista henkilöä tiputtamaan Remo-Wax korvatipat korvakäytäväsi ja huuhtelemaan korvasi alla olevien ohjeiden mukaan.

Lapset

Remo-Wax korvatippoja saa käyttää lapsille vain lääkärin harkinnan mukaan. Noudata tarkasti saamiasi ohjeita. On suositeltavaa, että lapsen korvat huuhdellaan lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla.

Kuulokojeen käyttäjät

Jos sinulla on kuulokoje, laita se paikoilleen vasta sen jälkeen, kun korva on huuhdeltu ja vesi valunut pois korvasta.

Mahdolliset haittavaikutukset

Remo-Wax korvatippojen käytön yhteydessä on joissakin harvinaisissa tapauksissa ilmennyt paikallisia allergisia reaktioita. Myös epämukava tunne korvakäytävässä, ihoärsytys ja ohimenevä huimaus ovat mahdollisia. Tinnitus voi olla korvavahatulpan oire ja korvan puhdistuksen jälkeen voi esiintyä ohimenevää tinnitusta.

Jos korvapumppu työnnetään syvälle korvakäytävään, se voi vaurioittaa tärykalvoa. Korvapumppu on mukana ainoastaan toimenpidepakkauksessa. Ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin, jos epäilet Remo-Wax korvatippojen aiheuttaneen sinulle jonkin haittavaikutuksen.

Tuotteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja valvovalle viranomaiselle (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea puh: 029 522 3341). Tämä on tärkeää valmisteen hyöty-/haittasuhteen jatkuvan seurannan kannalta.

Remo-Wax korvatippojen ja korvapumpun käyttö

Vahatulpan liuottaminen korvatipoilla

- Lämmitä Remo-Wax korvatipat -pullon sisältö kädenlämpöiseksi (noin 37 °C) sulkemalla pullo muutamaksi minuutiksi kämmenen sisään.
- Kallista pää kohti olkapäätä tai asetu makuulle pää sivulle käännettynä ja tiputa korvaan noin 10–20 tippaa Remo-Wax korvatippoja. Vedä korvanipukkaa kevyesti ylös ja alas pyörittävällä liikkeellä muutaman kerran. Korvaan voi laittaa pienen vanutupon, joka on kostutettu muutamalla Remo-Wax korvatipalla.
- Anna Remo-Wax korvatippojen vaikuttaa 20–60 minuuttia. Voit tarvittaessa antaa luoksen vaikuttaa myös yön yli.

Remo-Wax korvatippojen käytön jälkeen korvakäytävä on huuhdeltava. Voit käyttää huuhtelussa toimenpidepakkauksessa mukana olevaa korvapumppua tai käydä huuhteluttamassa korvat lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla. Etenkin jos kyseessä on lapsi, on suositeltavaa käydä huuhteluttamassa korvat vastaanotolla.

Korvan huuhteleminen korvapumpulla

- Korvapumppu tulee huuhdella joka kerta ennen käyttöä.
- Vedä korvapumppuun kädenlämpöistä vettä.
- Vie pumpun kärkeä muutaman millimetrin verran varovaisesti korvakäytävään ja huuhtele korva puristamalla korvapumppua kevyesti ja rauhallisesti.

Älä työnä pumpun kärkeä syvälle korvakäytävään!

- Toista huuhtelu muutaman kerran kunnes korvasta poistuva vesi on täysin kirkasta.
- Huuhtele korvapumppu ja purista se tyhjäksi jokaisen hoitokerran jälkeen. Jätä pumppu valumaan kärki alaspäin.

Jos vahatulppa ei liukene, voit tarvittaessa toistaa korvatippojen annostelun ja korvien huuhtelun kolmena peräkkäisenä päivänä.

Huom! Huuhtele korvakäytävä jokaisen hoitokerran jälkeen. Jos olet menossa korvahuuhteluun lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolle, noudata heiltä saamiasi ohjeita.

Korvan huuhtelemisen ei pitäisi koskaan aiheuttaa kipua. Jos tunnet kipua, lopeta korvan huuhteleminen ja ota yhteys lääkäriin.



Vältä tuotteen joutumista silmiin. Tarvittaessa huuhtele silmät runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä Remo-Wax korvatippojen käytöstä, ota yhteys lääkäriin, terveydenhoitajaan tai apteekkiin.

Koostumus

Allantoiini (3 mg/ml), etoksiloitu lanoliini, polysorbaatti 60, polysorbaatti 80, sorbitoli, fruktoosi, polyoksietyleenistearyylieetteri, polyoksietyleenioleyylieetteri, isononyyli isononanoaatti, isopropyylimyristaatti, riisileseöljy (*Oryza Sativa*), fenyylietyylialkoholi, setyylialkoholi, sorbiinihappo, bense-toniumkloridi, butyylhydroksitolueeni ja puhdistettu vesi.

Korvapumpun materiaali: polyvinyylikloridi (PVC). Korvapumppu on mukana ainoastaan toimenpidepakkauksessa.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Säilytä Remo-Wax korvatipat ja korvapumppu poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Älä käytä pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Tuotetta ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Vie tarpeeton tuote apteekkiin hävitettäväksi. Näin menetellen suojelet luontoa.

Valmistaja

Remo-Wax korvatipat:

Orion Oyj

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Suomi



Korvapumppu:

Albert Hohlkörper

GmbH & Co. KG

Maerkische Strasse 35

58675 Hemer

Saksa



Toimenpidepakkauksen kokoaja

Orion Oyj

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Suomi

Käyttöohje tarkistettu

05/2026

Pakkauksen symbolit



Lääkinnällinen laite



Katso käyttöohjeet



Varoitus



Valmistaja



25°C

Säilytyslämpötilan yläraja



Viimeinen käyttöpäivä

LOT

Eränumero



Yksilöllinen laitetunniste



Lajittele ulkopakkaus kartonkina



Lajittele pakkausseloste paperina



Lajittele tyhjä pullo muovina



Lajittele korvapumppu sekajätteenä. Korvapumppu on mukana ainoastaan toimenpidepakkauksessa.

BRUKSANVISNING Remo-Wax® örondroppar

Förpackningar

Remo-Wax örondroppar 10 ml

Vårdset: Remo-Wax örondroppar 10 ml med sköljblåsa

Indikationer

Remo-Wax örondroppar löser upp vaxproppar i örat.

Använd inte Remo-Wax örondroppar

- vid öroninflammation eller ont i örat
- vid flytningar från örat
- vid trumhinneskada, perforerad eller punkterad trumhinna (t. ex. rör inopererat i trumhinnan)
- om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnen i Remo-Wax örondroppar.

Särskilda användargrupper

Om du har koordinationssvårigheter, rörelsesvårigheter eller darrande händer be någon annan droppta Remo-Wax örondroppar i din hörselgång och skölja ditt öra enligt de här anvisningarna.

Barn

Remo-Wax örondroppar används för barn endast enligt läkares bedömning. Följ noggrant anvisningarna du får. Öronsköljning hos barn ska helst göras på läkares eller hälsovårdarens mottagning.

Användare av hörapparat

Om du använder hörapparat, sätt den på plats först efter öronsköljningen och när vattnet har runnit ut ur örat.

Möjliga biverkningar

I sällsynta fall har lokala allergiska reaktioner förekommit vid användning av Remo-Wax örondroppar. Obehaglig känsla i hörselgången, hudirritation och övergående svindel kan även förekomma. Tinnitus kan vara ett symtom av vaxpropp och övergående tinnitus kan förekomma efter rengöring av örat.

Om sköljblåsan trycks djupt in i hörselgången kan trumhinnan skadas. Sköljblåsan ingår endast i vårdsetet.

Kontakta läkare eller apotek om du misstänker att Remo-Wax örondroppar har gett dig biverkningar.

Allvarliga incidenter med produkten måste rapporteras till tillverkaren och tillsynsmyndigheten (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea tfn: 029 522 3341). Detta är viktigt för den löpande övervakningen av nytta/riskbalansen för produkten.

Användning av Remo-Wax örondroppar och sköljblåsan

Så här använder du örondroppar för att lösa upp vaxproppar

- Värm Remo-Wax örondroppar flaskan i handen i några minuter så att innehållet får kroppstemperatur (cirka 37°C).
- Luta huvudet åt sidan eller lägg dig med huvudet på sidan och droppta omkring 10–20 droppar Remo-Wax örondroppar i örat. Dra örsnibben upp och ner försiktigt med en vridande rörelse några gånger. Örat kan täppas till med en liten bomullstuss fuktad med några droppar Remo-Wax örondroppar.
- Låt Remo-Wax örondroppar verka i 20–60 minuter. Vid behov kan lösningen lämnas att verka över natten.

Efter användning av Remo-Wax örondroppar måste hörselgången sköljas. Du kan använda sköljblåsan som ingår i vårdsetet eller gå till läkaren eller hälsovårdaren för öronsköljning. Öronsköljning hos barn ska helst göras på läkares eller hälsovårdarens mottagning.

Så här sköljer du ur örat med sköljblåsan

- Sköljblåsan bör sköljas varje gång före användning.
- Dra upp handvarmt vatten i sköljblåsan.
- För försiktigt in sköljblåsans spets några millimeter i hörselgången och skölj örat med ett lätt och lugnt tryck på sköljblåsan.

Blåsans spets ska inte tryckas djupt in i hörselgången!

- Upprepa sköljningen några gånger, tills sköljvattnet är helt rent.
- Skölj sköljblåsan och kläm den tom efter varje behandling. Lämna blåsan att tömmas med spetsen nedåt.

Om vaxproppen inte löses, kan behandlingen med örondroppar och öronsköljning upprepas vid behov tre dagar i följd.

Obs! Skölj ur hörselgången med sköljblåsan efter varje behandling. Om öronsköljningen görs på läkares eller hälsovårdarens mottagning, följ deras anvisningar.

Det får aldrig göra ont vid sköljningen. I sådana fall, sluta öronsköljning och kontakta en läkare.



Undvik kontakt med ögonen. Vid behov skölj ögonen med rikligt vatten och kontakta läkare.

Om du har frågor angående användningen av Remo-Wax örondroppar bör du kontakta läkaren, hälsovårdaren eller apoteket.

Innehåll

Allantoin (3 mg/ml), etoxilerat lanolin, polysorbat 60, polysorbat 80, sorbitol, fruktos, polyoxietylenstearyleter, polyoxietylenoleyleter, isononyl isononanoat, isopropylmyristat, riskliolja (*Oryza Sativa*), fenyletylalkohol, cetylalkohol, sorbinsyra, bensenoniumklorid, butylhydroxitoluen och renat vatten.

Sköljblåsans material: polyvinylklorid (PVC). Sköljblåsan ingår endast i vårdsetet.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förvara Remo-Wax örondroppar och sköljblåsan utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte efter utgångsdatumet på förpackningen.

Produkten ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Överbliven produkt lämnas in på apotek för kassering. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Tillverkare

Remo-Wax örondroppar:

Orion Oyj
Orionvägen 1
FI-02200 Esbo
Finland

CE 0537

Sköljblåsa:

Albert Hohlkörper
GmbH & Co. KG
Maerkische Strasse 35
58675 Hemer
Tyskland

CE

Tillverkare av vårdset

Orion Oyj
Orionvägen 1
FI-02200 Esbo
Finland

Bruksanvisning reviderad

05/2026

Förpackningens symboler



Medicinteknisk produkt



Läs bruksanvisningen



Varning



Tillverkare



25°C

Övre temperaturgräns



Sista användningsdatum

LOT

Satsnummer



Unik produktidentifiering



Sortera den yttre förpackningen som kartong



Sortera bipacksedeln som papper



Sortera den tomma flaskan som plast



Sortera sköljblåsan som blandavfall. Sköljblåsan ingår endast i vårdsetet.

S-0015595-2

ORION
PHARMA