



BEVITA® EYE SILMÄGEELI

Sisältää 0,2 % karbomeeria

Voiteleva silmägeeli

Fosfaatiton

10 g



Ainesosat: Karbomeeri 0,2 %, setrimidi, sorbitoli, natriumhydroksidi, dinatriumedetaatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Mikä Bevita® Eye silmägeeli on? Bevita® Eye silmägeeli on steriili karbomeeria sisältävä silmägeeli, jolla on ns. muko-adheesiivisiä ominaisuuksia. Geeli voitelee silmää muodostamalla suojaavan kalvon sarveis- ja sidekalvon pinnalle, mikä saa silmän pinnan tuntumaan miellyttävämmältä ja kosteammalta.

Bevita® Eye silmägeeli -pakkaus: Bevita® Eye silmägeeli on pakattu 10 g:n tuubeihin.

Mihin Bevita® Eye silmägeeli on tarkoitettu? Bevita® Eye silmägeeli on tarkoitettu lievittämään kuivasilmäisyyden oireita, kuten epämukavaa tai roskan tunnetta silmissä tai silmien lieviä ärsytysoireita. Bevita® Eye silmägeeli antaa pitkäkestoisen helpotuksen.

Kuinka silmägeeliä käytetään? 1 geelitippa silmään/silmiin 3-4 kertaa vuorokaudessa tai tarpeen mukaan. Poista tuubin korkki, taivuta päättä taaksepäin ja vedä alaluomea hieman alaspäin siten, että luomen ja silmän väliin muodostuu tasku. Purista tuubia hitaasti, kunnes pieni tippa muodostuu tuubin kärkeen, josta se tipahtaa silmään ja levittäytyy tasaiseksi kerrokseksi luomen sisäpinnalle. Räpyttele silmiäsi 2-3 kertaa, jotta geelitippa leviää tasaisesti silmän pinnalle. Pyyhi mahdollinen geeliylimäärä silmänympärysalueelta. Sulje tuubin korkki huolellisesti.

Varoitukset ja varoitoimet

- Älä käytä tätä silmägeeliä, jos tuubi on vaurioitunut tai uuden tuubin korkin sulkeva sinetti näyttää vahingoittuneelta.
- Älä käytä geeliä, jos olet allerginen jollekin sen sisältämistä ainesosista.
- Valmistetta ei saa käyttää tuubiin merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Vältä koskemasta silmän pintaa tuubin kärjellä.
- Sulje tuubin korkki huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Poista piilolinssit silmistä ennen geelin käyttöä. Piilolinssit saa laittaa takaisin silmiin aikaisintaan 30 minuutin kuluttua geelitippojen laitoista.
- Harvoissa tapauksissa näkö voi sumentua hetkeksi geelitippojen laiton jälkeen. Tämä johtuu geelin viskositeetista. Odota siis muutama sekunti ennen kuin ryhdyt tarkkaa näkökykyä vaativiin toimiin.
- Jos käytät tämän silmägeelin lisäksi jotain toista silmävalmistetta, annostelee Bevita® Eye silmägeeli aina viimeiseksi. Pidä vähintään 15 minuutin tauko toisen silmävalmisteen ja tämän silmägeelin annostelujen välissä.
- Avattu tuubi ja mahdollisesti jäljellä oleva geeli on hävitettävä, kun ensimmäisestä avaamisesta on kulunut 28 vrk.
- Säilytettävä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.
- Säilytettävä +2 - +25 °C:ssa.
- Vain ulkoiseen ja paikalliseen käyttöön silmissä.



Valmistaja: Farmigea S.p.A.
Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italia



Jakelija: Orion Oyj, PL 65
02101 Espoo. Puh: 010-4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: tammikuu 2021

Pakkauksen symbolit:



Lue käyttöohjeet, www.bevitaeye.fi



Lämpötilan raja-arvot



Jakelija



Käännös



Steriloitu aseptisesti



Eränumero



Viimeinen käyttöpäivämäärä



Valmistaja



Lääkinnällinen laite

Kierrätysohjeet:



Kierrätä kotelo kartonkina



Kierrätä tyhjä tuubi muovina



Kierrätä korkki muovina



Kierrätä pakkausseloste paperina

CE 0546

S-001125-3



BEVITA® EYE ÖGONGEL

Innehåller 0,2 % karbomer

Smörjande ögongel

Utan fosfater

10 g



Innehållsämnen: Karbomer 0,2 %, cetrimid, sorbitol, natriumhydroxid, dinatriumedetat, vatten för injektionsvätskor.

Vad är Bevita® Eye ögongel? Bevita® Eye ögongel är en steril ögongel som innehåller karbomer och som innehåller s.k. mukoadhesiva egenskaper. Bevita® Eye ögongel smörjer ögat genom att bilda en skyddande hinna på horn- och bindhinnans yta. Denna hinna gör att ögats yta känns behagligare och fuktigare.

Bevita® Eye ögongel förpackningens beskrivning: Bevita® Eye ögongel tillhandahålls i tuber med 10 g ögongel.

För vilka besvär lämpar sig Bevita® Eye ögongel? Bevita® Eye ögongel är avsett att lindra de symtom torra ögon orsakar, som t.ex. allmänna obehagskänslor eller känslor av skräp i ögat samt lindrig ögonirritation. Bevita® Eye ögongel ger en långvarig lindring.

Hur ska Bevita® Eye ögongel användas? 1 droppe gel i ögat/ögonen 3-4 gånger dagligen, eller vid behov. Skruva av hatten på tuben, luta huvudet bakåt och dra ned det nedre ögonlocket en aning så att en ficka bildas mellan ögats yta och ögonlocket. Kläm på tuben långsamt tills en liten droppe gel faller ned och breder ut sig över det nedre ögonlockets insida. Blinka 2-3 gånger så att geldroppen breder ut sig möjligast jämnt över hela ögats yta. Torka av eventuell överlopps gel som brett ut sig i området runt ögat. Tillslut tuben väl efter användandet.

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Använd inte denna ögongel om tuben är skadad eller sigillet på hatten till en ny tub ser ut att vara brutet.
- Använd inte preparatet om du är överkänslig mot något av innehållsämnen.
- Får inte användas efter det utgångsdatum som anges på tuben.
- Undvik att vidröra ögats yta med tubspetsen.
- Tillslut tuben noggrant varje gång då du använt preparatet.
- Ta ut kontaktlinser ur ögonen innan du applicerar Bevita® Eye ögongel. Linserna kan sättas tillbaka i ögonen igen tidigast då 30 minuter förflutit efter droppandet.
- Kortvarig dimsyn kan förekomma i sällsynta fall. Detta beror på gelens viskösa egenskaper. Vänta därför i några sekunders tid innan du tar itu med någon uppgift som kräver skarp syn.
- Om du utöver Bevita® Eye ögongel också använder något annat ögonpreparat, ska du ha en paus på minst 15 minuter mellan doseringen av preparaten, och dessutom alltid dosera Bevita® Eye ögongel till sist.
- Öppnad tub och eventuellt kvarvarande innehåll ska kasseras då 28 dagar förflutit efter att tuben öppnades för första gången.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvaras vid +2 - +25 °C.
- Endast för utvärtes och lokalt bruk i ögonen.



Tillverkare: Farmigea S.p.A.
Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italien



Distributör: Orion Oyj, PB 65
02101 Esbo. Tfn: 010-4261

Denna bipacksedel ändrades senast: januari 2021

Förpackningens symboler:



Läs bruksanvisningen, www.bevitaeye.fi



Gränsvärden för förvaringstemperaturerna



Steriliserad med aseptisk teknik



Satsnummer



Sista användningsdatum



Tillverkare



Medicinteknisk produkt



Distributör



Översättning

Återvinningsinstruktioner:



Sortera den yttre förpackningen som kartong



Sortera tomma tuben som plast



Sortera hatten som plast



Sortera bipacksedeln som papper