

Bevita® Eye silmäpyyhe on pehmeä kertakäyttöinen kuitukangasliina, jonka ainesosat kosteuttavat ja puhdistavat silmäluomeja ja silmäripsiä. Pyyhkeet on tarkoitettu aikuisten ja lasten herkän silmänäpäräysihon ja silmäluomien päivittäiseen puhdistukseen. Bevita® Eye silmäpyyhe sopii erityisen hyvin käytettäväksi silmäluomien reunojen tulehdustilojen (mm. blefariitti) yhteydessä. Silmäpyyhe on rasvaton kertakäyttöinen liina, joka luo miellyttävän, raikkaan ja hyvinvoivan tunteen. Pyyhkeet eivät ärsytä silmäluuetta, joten silmiä ei tarvitse huuhdella vedellä käytön jälkeen.

Bevita® Eye silmäpyyhe ei sisällä parabeneja, alkoholia tai silikonila.

Ainesosat: Karrageenigeeli (*Ahnfeltiopsis concinna* -uute), kaprylyyli-/kapryyliglukosidi, kokoyliisoijapolypeptidi, natriumkloridi, kasvi-peräinen glyseriini, natriumbentsoaatti, kaliumsorbaatti, vedetön natriumdehydroasetaatti, puhdistettu vesi.

Käyttöohjeet:

Silmien alueen päivittäiseen puhdistamiseen:

Avaa pussi puhtain käsin ja ota kertakäyttöpyyhe suojapussistaan. Avaa pyyhe kokonaan ja pyyhi sillä hellävaroen yläluomien luomireunan ja silmäripsien yli pitäen silmäsi suljettuna.



Jos silmien alueella on vaikeasti irrotettavia eritteitä,

silmäluomien reuna on tulehtunut (esim. blefariitti, sidekalvon-tulehdus, silmäluomien ja sidekalvon tulehdus, näärännäppy) tai **kyynelkanava on tukkeutunut**, suositellaan lämpimien, kosteiden kääreiden käyttöä. Näissä tapauksissa voit lämmittää edelleen suljetussa suojapussissaan olevan kertakäyttöpyyhkeen lämpimässä (40 °C) vedessä 3–5 minuutin ajan. Kun pyyhe on lämmennyt, avaa suojapussi, ota pyyhe pussistaan ja hiero hellävaroen hoidettavaa aluetta edelleen kokoon taitetulla pyyhkeellä 1–2 minuutin ajan pitäen silmäsi suljettuna.



Jos silmäluomet kutiavat tai ovat turvonneet, kertakäyttöpyyhkeet toimivat kutamista ja turvotusta lievittävinä kylminä kääreinä. Näissä tapauksissa voit jäähdyttää edelleen suljetussa suojapussissaan olevaa kertakäyttöpyyhettä jääkaapissa vähintään tunnin ajan. Avaa pussi ja aseta pyyhe sen taitoksia avaamatta silmäluomelle 1–2 minuutin ajaksi pitäen silmäsi suljettuna.



ÄLÄ HUUHTELE SILMIÄ KÄYTÖN JÄLKEEN.

Varoitukset/Varotoimet:

- Älä käytä silmäpyyhettä, jos olet yliherkkä jollekin sen sisältämälle ainesosalle.
- Älä käytä silmäpyyhettä, jos sen suojapussi on vaurioitunut.
- Lämpimät ja kylmät kääreet: Noudata edellä annettuja ohjeita.
- Kun kertakäyttöpyyhe on lämmitetty, on se käytettävä muutaman minuutin kuluessa tai hävitettävä käyttämättömänä.
- Säilytettävä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
- Säilytettävä +2–+25 °C:ssa.
- Valmistetta ei saa käyttää pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Älä käytä samaa pyyhettä molempiin silmiin.
- Ei saa jäättyä.

VAIN ULKOISEEN KÄYTTÖÖN.



Valmistaja: Farmigee S.p.A.
Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italia



Jakelija: Orion Oyj, PL 65, 02101 Espoo
Puh: 010-4261

Käyttöohje on tarkistettu viimeksi: maaliskuu 2020

Pakkauksen symbolit:



Lue käyttöohjeet, www.bevitaeye.fi



Lämpötilan raja-arvot



Kertakäyttöinen



Eränumero



Viimeinen käyttöpäivä



Valmistaja



Jakelija



Käännös

Kierrätysohjeet:



Lajittele silmäpyyhe sekajätteenä



Lajittele kotelo kartonkina



Lajittele suojapussi muovina



Lajittele pakkaukseloste paperina

Bevita[®] Eye ögonservett är en mjuk engångsservett i fibertyg, vars ingredienser såväl fuktar som rengör ögonlocket och ögonfransarna. Servetterna är avsedd för daglig rengöring av ögonlocken och den känsliga huden runt ögonen hos både vuxna och barn. Bevita[®] Eye ögonservett lämpar sig särskilt väl vid behandling av inflammationer i ögonlockskanten (bl.a. blefarit). Ögonservetten är en fettfri engångsservett som lämnar en skön, fräsch och frisk känsla. Servetterna irriterar inte ögonområdet. Ögonen behöver inte sköljas med vatten efteråt. **Bevita[®] Eye ögonservett innehåller ej parabener, alkohol eller silikon.**

Innehållsämnen: Karragengel (*Ahnfeltiopsis concinna* extrakt), kaprylyl/kaprylglukosid, kokoylsojapolytepid, natriumklorid, vegetabiliskt glycerin, natriumbensoat, kaliumsorbat, vattenfritt natriumdehydroacetat, renat vatten.

Bruksanvisning:

För daglig rengöring av ögonområdet: Öppna skyddspåsen med rena händer och ta ut engångsservetten. Öppna servetten helt och hållet, och för den lätt och försiktigt över ögonlockskanten och ögonfransarna medan du håller ögat slutet.



Ifall det finns sekret som är svårt att ta bort, inflammationer i ögonlockets kant (t. ex. blefarit, bindhinneinflammation, blefaro-konjunktivit, vage) eller **stopp i tårkanalen** rekommenderas det att använda våtvarma omslag på det drabbade området. För detta ändamål kan du värma en engångsservett, som fortfarande ligger i sin slutna, intakta skyddspåse, i varmt vatten (40 °C) i 3–5 minuter. Då servetten värmts upp, ska påsen öppnas och den fortfarande hopvikta engångsservetten användas för att försiktigt massera området som ska behandlas i 1–2 minuter med ögat slutet.



Vid kliande eller svullna ögonlock ger kalla omslag en sammandragande och lindrande effekt. För detta ändamål kyl engångsservetten (som ligger i sin slutna skyddspåse) i kylskåp i minst en timmes tid. Öppna påsen och lägg den fortfarande hopvikta servetten på ögat i 1–2 minuters tid, medan du håller ögat slutet.



**SKÖLJ INTE ÖGONEN EFTER ATT DU ANVÄNT
ENGÅGSSERVETTERNA.**

Varningar/Försiktighetsåtgärder:

- Använd inte ögonservetterna om du är överkänslig mot något av innehållsämnen.
- Använd inte servetten om skyddspåsen är skadad.
- För varma och kalla omslag, följ instruktionerna i denna bruksanvisning.
- Då engångsservetten värmts upp, ska den användas inom några minuter eller alternativt kastas bort.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvaras vid +2–+25 °C.
- Får inte användas efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Använd inte samma engångsservett för båda ögonen.
- Får ej frysas.

ENDAST FÖR UTVÄRTES BRUK.



Tillverkare: Farmigea S.p.A.
Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italien



Distributör: Orion Oyj, PB 65, 02101 Esbo
Tel: 010-4261

Bruksanvisningen senast reviderad: mars 2020

Förpackningens symboler:



Läs bruksanvisningen, www.bevitaeye.fi



Gränsvärden för förvaringstemperaturen
25°C



Återanvänd inte



Satsnummer



Sista användningsdatum



Tillverkare



Distributör



Översättning

Återvinningsinstruktioner:



Sortera ögonservetten som blandavfall



Sortera den yttre förpackningen som kartong



Sortera skyddspåsen som plast



Sortera bipacksedel som papper