

Keskivaikean ja vaikean kuivasilmäisyyden hoitoon: kosteuttaa, suojaa, voitelee, tasapainottaa. Hoitaa ja ennaltaehkäisee kuivien silmien oireita.

Ainesosat: Deksipantenoli (B5-provitamiini) 0,5 %, sacha inchi (*Plukenetia volubilis*) -siemenöljy 0,5 %, trehaloosi, glyseroli ja emulgattorit polyoksyetyleeni sorbitaani mono-oleaatti ja sorbitaani mono-oleaatti steriilissä, hypotonisessa trometamolii/sitraatti-emulsiossa.


Ei sisällä säilöntäaineita, alkoholia, fosfaatteja, boraatteja, mineraaliöljyä tai eläinperäisiä ainesosia.

Mikä Bevita® Eye silmäsuihke on ja mihin sitä käytetään?

Bevita® Eye silmäsuihke on kuivien silmien oireiden ja vaurioiden hoitamiseen ja ennaltaehkäisemiseen sekä silmäluomien ja silmänympärysilhojen kosteuttamiseen tarkoitettu lipidi-mikroemulsio-silmäsuihke. Tuote annostellaan suljetulle silmäluomelle. Kuivien silmien kyynelkalvon syntyy pistemäisiä kuivia ja hyvin korkean osmolaarisuuden kohtia, jotka aiheuttavat silmänpinnan vaurioita ja tulehdusta. Silmien epämukavat kutinan, polttelun ja karheuden tunteukset sekä näön sumeneminen johtuvat näistä vaurioista ja kyynelkalvon kunnollisen suojan puuttumisesta. Silmäsuihkeen lipidi-mikroemulsion sisältämä sacha inchi -siemenöljy levittyy silmän pinnalle vahvistaen kyynelkalvon luonnollisen lipidikerroksen suojaa ja estäen kyynelnesteen haihtumista. Trehaloosi, deksipantenoli ja glyseroli sitovat vettä sekä vakauttavat ja voitelevat kyynelkalvoa. Lievästi hypotonisessa (matalaosmolaarisessa) liuoksessa ne auttavat pitämään osmolaarisuuden turvallisella tasolla. Deksipantenoli (B5-provitamiini) ja glyseroli sekä sacha inchi -siemenöljyn luonnolliset antioksidanttihyhdisteet ja omega-rasvahapot suojaavat silmän pintaa ja silmänympärysilhoja kuivumisen aiheuttamilta soluvaurioilta ja nopeuttavat niiden paranemista. Silmät tuntuvat miellyttäviltä, kun silmän pinta on toipunut. Tulehduksen vaimennuttua silmän sidekalvon punoitus vähenee. Näkeminen helpottuu myös silmiä rasittavissa olosuhteissa. Bevita® Eye silmäsuihke on Suomessa kehitetty ja valmistettu steriili CE-merkitty lääkinällinen laite, joka sopii käytettäväksi myös piilolinssien kanssa. Erikoisrakenteensa ansiosta pulloa voi käyttää missä asennossa tahansa.

Käyttöohjeet:

1. Irrota suojakorkki.
2. Testaa annostelijan toimintaa ennen suihkeen ensimmäistä annostelua suihkauttamalla muutama kerta esim. käsivarteen tai ilmaan.
3. Suuttimessa on pykälä: paina suutin pohjaan asti suihkeen annostelemiseksi. Vie pullo 15-20 cm:n päähän silmistä. Sulje silmät ja annostele 1-2 suihkausta silmäluomille.

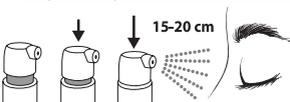

4. Laita suojakorkki takaisin suuttimen päälle.

Voit käyttää suihketta oireiden mukaan useita kertoja päivässä sekä piilolinssien käytön aikana. Jos käytät muita silmänympärystutotteita tai silmämeikkiä, anna niiden kuivahtaa vähintään 10 minuuttia ennen suihkeen käyttöä tai odota vähintään 10 minuuttia suihkeen annostelun jälkeen. Jos käytät silmämeikkiä, annostele suihke hiukan kauempaa meikin levittämisen estämiseksi (meikkituotteen ominaisuuden mukaan). Käytä pullo kuuden (6) kuukauden kuluessa avaamisesta ja viimeiseen käyttöpäivään mennessä.

Varoitukset ja vasta-aiheet

- Älä käytä tuotetta, jos olet yliherkkä jollekin sen ainesosalle. Ongelmatilanteissa käänny terveydenhuollon ammattihenkilön puoleen.
- Älä käytä tuotetta, jos pullo on vioittunut.
- Älä kosketa pulloon suuttimella silmää tai ihoa. Älä kosketa suuttimen kärkeä sormilla.
- Suihke voi aiheuttaa tilapäistä epämukavuuden tunnetta, jos sitä annostellaan avoimeen silmään.
- Älä käytä tuotetta pullossa ja kotelossa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen tai yli kuusi kuukautta avaamisesta.
- Odota vähintään 10 minuuttia suihkeen ja muun silmänhoitotuotteen annostelun välillä.
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Säilytä +5 – +25 °C:een lämpötilassa. Suojaa pullo suoralta auringonvalolta. Älä käytä tuotetta, joka on jäähtynyt tai jota on säilytetty pitkään kuumassa.
- Tyhjä pullo on muovipakkausjätettä. Irrota korkki ja palauta se ja pullo erikseen muovijätteen kierrätysastiaan. Pakkauseloste kierrätetään paperijätteenä ja kartonkikotelo kartonkipakkausjätteenä. Tarkoituksellisen ylitätön vuoksi pulloon jää pieni määrä nestettä.
- Tuotteen käyttöön liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle, Oy Finnsusp Ab, quality@piloset.fi / puh. 02 489 110 ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle, puh. 029 522 3341.

Oy Finnsusp Ab, Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto. www.finnsusp.fi

Jakelija: Orion Oyj, PL 65, 02101 Espoo. Puh: 010-4261

Tämä pakkauseloste on tarkistettu viimeksi: marraskuu 2024

Pakkauksen symbolit:

- | | | | |
|--|---|--|----------------------------|
| | Lue varoitukset pakkauselosteesta | | Steriloitu aseptisesti |
| | Lue käyttöohjeet, www.bevitaeye.fi | | Lääkinällinen laite |
| | Lämpötilan raja-arvot | | Valmistuspäivä |
| | Suojaa auringonvalolta | | Viimeinen käyttöpäivämäärä |
| | Käytä kuuden kuukauden kuluessa avaamisesta | | Valmistaja |
| | Ei lasten ulottuville eikä näkyville | | Yksilöllinen laitetunniste |
| | Eränumero | | |

Kierrätysohjeet:

- Kierrätä pakkauseloste paperina
- Kierrätä kartonki-kotelo kartonkina
- Kierrätä tyhjä pullo ja korkki erikseen muovina



BEVITA® EYE ÖGONSPRAY

Innehåller dexpantenol, sacha inchi -fröolja, trehalos och glycerol

Återfuktande ögonspray för ögon och huden runt ögonen
Utän konserveringsmedel och fosfater
17 ml



För behandling av måttligt eller mycket torra ögon:

tillför fukt, ger skydd, smörjer och balanserar. Lindrar och förebygger symtom orsakade av torra ögon.

Innehållsämnen: Dexpantenol (provitamin B5) 0,5 %, sacha inchi (*Plukenetia volubilis*) -fröolja 0,5 %, trehalos, glycerol, och emulsionsmedel polyoksietylen sorbitan mono-oleat och sorbitan mono-oleat i en steril, hypoton emulsion med trometamol/citrat.


Innehåller varken konserveringsmedel, alkohol, fosfater, borater, mineraloljor eller animaliska ingredienser.

Vad är Bevita® Eye ögonspray och vad används det för?

Bevita® Eye ögonspray är en lipid-mikroemulsion som är avsedd för behandling och förebyggande av symtom och skador orsakade av torra ögon, samt för fuktande av ögonlock och huden runt ögonen. Sprayen ska doseras på slutna ögonlock. Då ögonen är torra uppkommer små, torra punkter med mycket hög osmolaritet i tårfilmen, vilket orsakar skador och inflammation på ögats yta. Den obehagliga klåda, brännande känsla, känsla av strävhets samt dimsyn som torra ögon orsakar, beror på just dessa skador och på bristen av det skydd som en intakt tårfilm erbjuder. Sacha inchi -fröolja i lipid-mikroemulsionen i Bevita® Eye ögonspray breder ut sig över ögats yta och förstärker det naturliga skydd som tårfilmens lipidskikt ger. Samtidigt förebygger oljan också avdunstningen av tårvätskan. Sprayens trehalos, dexpantenol och glycerol binder vatten och stabiliserar samt smörjer tårfilmen. I den lätt hypotona (med låg osmolaritet) lösningen hjälper dessa ämnen till att upprätthålla osmolariteten på en trygg nivå. De naturliga antioxidanterna och omega-fettsyrorna i dexpantenol (provitamin B5) och glycerol samt sacha inchi -fröolja skyddar ögats yta och huden runt ögat mot cellskador orsakade av torka, och gör dessutom läkningen av sådana skador snabbare. Sprayen ger en behaglig känsla i ögonen då ögats yta återhämtar sig. När inflammationsreaktionen väl lagt sig, minskar även rodnaden i bindhinnan. Det blir lättare att se också under omständigheter som annars anstränger ögonen. Bevita® Eye ögonspray är en steril CE-märkt medicinteknisk produkt som utvecklats och tillverkats i Finland, som lämpar sig även för bruk tillsammans med kontaktlinser. Flaskans specialdesign gör det möjligt att använda sprayflaskan i vilket läge som helst.

Bruksanvisning:

1. Ta av skyddslocket.
2. Testa spraypumpens funktion före den första användningen genom att pumpa några gånger t.ex. på din arm eller ut i luften.
3. Munstycket har en sektion: tryck munstycket ända ner för att dosera sprayen. Håll flaskan på ca 15-20 cm avstånd från ögat. Sluta ögat och dosera 1-2 pumpningar på bägge ögonlocken.

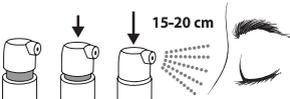

4. Lägg tillbaka skyddslocket.

Sprayen kan användas flera gånger dagligen enligt behov och symtom. Kan även användas tillsammans med kontaktlinser. Om du använder andra produkter som appliceras runt ögonen eller ögonmakeup, ska du låta dessa torka i minst 10 minuter innan du doserar sprayen eller tvärtom, vänta i minst 10 minuter efter att du använt sprayen tills du applicerar de andra produkterna. Spraya ögonsprayen från ett litet längre avstånd än vanligt om du använder ögonmakeup. Detta för att förhindra att makeupen kladdar (berende på makeupens egenskaper). Innehållet i sprayflaskan ska användas inom sex (6) månader efter att flaskan tagits i bruk, och alltid före det utgångsdatum som anges på förpackningen.

Varningar och kontraindikationer:

- Använd inte ögonsprayen om du är överkänslig mot något av innehållsämnen. Vid tydliga situationer kontakta hälsovårdspersonal.
- Använd inte produkten om flaskan är skadad.
- Vidrör inte ögat eller huden med spraymunstycket. Rör inte heller vid spraymunstycket med fingrarna.
- Sprayen kan orsaka övergående obehagskänslor i ögat om den doseras i öppet öga.
- Produkten får inte användas efter det utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen, och inte heller i mer än sex månaders tid efter att flaskan tagits i bruk.
- Håll en paus på minst 10 minuter mellan doseringen av denna spray och andra eventuella ögonvårdsprodukter.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvaras vid +5-+25 °C. Skydda sprayflaskan mot direkt solljus. Använd inte spray som frusit eller som förvarats länge i höga temperaturer.
- Sortera tomma flaskan och korken som plast. Sortera bipacksedeln som papper. Sortera den yttre förpackningen som kartong. Flaskan är överfylld med avsikt, vilket innebär att en liten mängd vätska kommer att bli kvar i flaskan.
- Allvarliga incidenter med produkten måste rapporteras till tillverkaren, Oy Finnsusp Ab, quality@piilose.fi / tfn. 02 489 110 och till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea tfn. 029 522 3341.

Oy Finnsusp Ab, Pääskykalliontie 5, 21420 Lundo. www.finnsusp.fi

Distributör: Orion Oyj, PB 65, 02101 Esbo. Tfn: 010-4261

Denna bipacksedel ändrades senast: november 2024

Förpackningens symboler:

	Läs varningarna i bipacksedeln		Steriliserad med aseptisk teknik
	Läs bruksanvisningen, www.bevitaeye.fi		Medicinteknisk produkt
	Gränsvärden för förvaringstemperaturerna		Tillverkningsdatum
	Skydd mot solljus		Sista användningsdatum
	Använd vid 6 månader efter öppnandet		Tillverkare
	Förvaras utom syn- och räckhåll för barn		Unik produktidentifiering
	Satsnummer		

Återvinningsinstruktioner:

- Sortera bipacksedeln som papper
- Sortera den yttre förpackningen som kartong
- Sortera tomma flaskan och korken som plast

CE 0537

2527-3
S-0011717-3