

Sisältää 0,2 % hyaluronihappoa ja 0,2 % TS-polysakkaridia
Kosteuttavat ja voitelevat silmätipat
Säilöntäaineeton ja fosfaattiton
10 ml

Ainesosat: Hyaluronihappo 0,2 %, TS-polysakkaridi 0,2 %, mannitoli, natriumsitraattidihydraatti, sitruunahappomonohydraatti, injektio-steriiliin käytettävä vesi.

Mikä Bevita® Eye Pro Hydra silmätipat on?

Bevita® Eye Pro Hydra silmätipat on kosteuttava ja voiteleva silmätippaliuos, joka sisältää suojaavia ainesosia. Kehon voitelevissa nesteissä esiintyvä hyaluronihappo voitelee silmän pintaa. TS-polysakkaridi suojaa ja tasapainottaa kyynelfilmiä. Koostumus on patentoitu. **Valmiste on steriili, säilöntäaineeton ja fosfaattiton.**

Bevita® Eye Pro Hydra silmätipat -pakkaus

Bevita® Eye Pro Hydra silmätipat on saatavana säilöntäaineettomassa 10 ml tippapullossa.

Mihin Bevita® Eye Pro Hydra silmätipat on tarkoitettu?

Bevita® Eye Pro Hydra silmätipat voitelee ja suojaa silmän pintaa sekä lievittää pitkäkestoisesti kuivasilmäisyyden oireita. Silmätippaliuos sisältää TS-polysakkaridia ja korkean molekyylipainoin omaavaa hyaluronihappoa, jota valmistetaan bioteknologisen synteessin avulla. Hyaluronihappo on kehon voitelevissa nesteissä esiintyvä aine. Viskositeettinsa ansiosta sillä on optimaalisesti silmää voitelevat ominaisuudet, silmää kosteuttava ja kyynelfilmiä stabiloiva vaikutus. TS-polysakkaridi on luonnosta peräisin oleva aine, jota eristetään *Tamarindus indica* -kasvin siemenistä. Sillä on sarveiskalvon ja sidekalvon pintaa suojaava vaikutus. TS-polysakkaridi muodostaa suojaavan kalvon silmän pinnalle, mikä auttaa palauttamaan kyynelfilmin ja silmän pinnan fysiologisen tasapainon. Näiden kahden aineen seoksella on sarveiskalvoon ja sidekalvoon kohdistuvat synergistiset vaikutukset, jotka tarjoavat silmille pitkäkestoisen suojan ympäristötekijöiden (tuuli, aurinko, savu, kuiva ilma), silmiin kohdistuvan stressin (liian voimakas valo, tietokoneiden pitkäaikainen käyttö) ja mekaanisten tekijöiden (piilolinssien käyttö, silmäleikkauksen jälkitila) aiheuttamaa ärsytystä vastaan.

Kuinka silmätippoja käytetään ja kuinka paljon?

1 tippa kumpaankin silmään tarpeen mukaan kahdesti päivässä tai useammin.



Paina pullon korkkia ja käännä sitä nuolen osoittamaan suuntaan. Poista korkki. Aseta pullo ylösalaisin silmän yläpuolelle, purista pulloa kevyesti ja tiputa yksi tippa kumpaankin silmään. Tarkista, ettei pullon tippäkärkeen jää jäännöstippaa ja kierrä korkki kiinni.

Bevita® Eye Pro Hydra silmätipat on yhteensopiva muiden piilolinssien kanssa.

Varoitukset ja varoitoimet

- Valmiste on tarkoitettu vain ulkoiseen ja paikalliseen käyttöön silmissä.
- Älä käytä silmätippaliuosta, jos pullo on vaurioitunut.
- Älä käytä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin sen sisältämälle ainesosalle.
- Valmistetta ei saa käyttää pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Varo koskettamasta silmän pintaa, ihoa tai muita pintoja tippakärjellä kontaminoitumisen välttämiseksi.
- Harvoissa tapauksissa näkö voi sumentua ja silmässä tuntua kirvelyä hetken ajan silmätippojen laiton jälkeen. Tämä johtuu silmätippaliuoksen viskositeetista.

Odot, kunnes oireet ovat hävinneet, ennen kuin ryhdyt tarkkaa näkökykyä vaativiin toimiin.

- Annosteltuasi Bevita® Eye Pro Hydra silmätipat pidä vähintään 10-15 minuutin tauko ennen muiden silmävalmisteiden annostelua.
- Avatun pullon sisältö on käytettävä 90 päivän kuluessa sen ensimmäisestä avaamisesta.
- Sulje pullo huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen varmistuen, ettei tippäkärkeen jää nestettä. Ravista neste tarvittaessa pois terävällä ranneliikkeellä.
- Älä tiputa pullosta kerralla enempää kuin 30 tippaa, ettei pullo painu kasaan.
- Bevita® Eye Pro Hydra silmätipat -pullo on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.
- Jos silmissä ilmenee ärsytystä tai polttavaa tunnetta, lopeta valmisteiden käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
- Jos olet raskaana tai imetät, on suositeltavaa keskustella lääkärin kanssa valmisteiden käytöstä.
- Säilytettävä poissa lasten näköviltä ja ulottuvilta.
- Säilytettävä +2 - +25 °C:ssa.
- Silmätippoja ei saa niellä.



Valmistaja: Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italia



Jakelija: Orion Oyj, PL 65, 02101 Espoo
Puh: 010-4261

Tämä pakkauseloste on tarkistettu viimeksi:
heinäkuu 2024

Tuotteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle (Farmigea) ja valvovalle viranomaiselle (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Puh: 029 522 3341).

Pakkauksen symbolit:

	Steriloitu aseptisesti		Valmistuspäivä
	Lue käyttöohjeet, www.bevitaeye.fi		Valmistaja
	Lääkinnällinen laite		Jakelija
	Lämpötilan raja-arvot		Käännös
	Viimeinen käyttöpäivä		Yksilöllinen laitetunniste
	Eränumero		Avatun pullon sisältö on käytettävä 90 päivän kuluessa sen ensimmäisestä avaamisesta.
	Varoitus		

Kierrätysohjeet:



Kierrätä kotelo kartonkina



Kierrätä pakkauseloste paperina



Kierrätä tyhjä pullo muovina

Innehåller 0,2 % hyaluronsyra och 0,2 % TS-polysackarid

Fuktande och smörjande ögondroppar

Utan konserveringsmedel och fosfater
10 ml

Innehållsämnen: Hyaluronsyra 0,2 %, TS-polysackarid 0,2 %, mannitol, natriumcitratdihydrat, citronsyra-monohydrat, vatten för injektionsvätskor.

Vad är Bevita® Eye Pro Hydra ögondroppar?

Bevita® Eye Pro Hydra ögondroppar är återfuktande och smörjande ögondroppar i form av en lösning som innehåller skyddande ingredienser. Hyaluronsyra är ett ämne som förekommer i kroppens egna smörjande vätskor som skyddar och smörjer ögats yta. TS-polysackarid skyddar och balanserar tårfilmen. Komposition är patenterad. **Dropparna är sterila och innehåller inga konserveringsmedel och fosfater.**

Bevita® Eye Pro Hydra ögondroppar

förpackningens beskrivning

Bevita® Eye Pro Hydra ögondroppar utan konserveringsmedel finns att få i droppflaskor med 10 ml.

Vad används Bevita® Eye Pro Hydra ögondroppar för?

Bevita® Eye Pro Hydra ögondroppar smörjer och skyddar ögats yta samt ger en långvarig lindring av olika symptom orsakade av torra ögon. Ögondropparna innehåller TS-polysackarid och stormolekylär hyaluronsyra som tillverkats på bioteknologisk väg. Hyaluronsyra är ett ämne som förekommer i kroppens egna smörjande vätskor. Tack vare sin viskositet är dropparna optimalt smörjande och återfuktande. Dessutom har de en stabiliserande effekt på tårfilmen. TS-polysackarid är ett naturligt ämne som utvinns ur växten *Tamarindus indicas* frön. Detta ämne skyddar ytan av ögats horn- och bindhinna. TS-polysackariden bildar en skyddande hinna på ögats yta, vilken hjälper till att återställa ögats tårfilm och ytans normala fysiologiska balans. De synergetiska effekter som blandningen av dessa två ämnen har på ögats horn- och bindhinna, ger ögonen ett långvarigt skydd mot den irritation som olika faktorer i omgivningen (vind, sol, rök, torr luft), olika stressmoment (alltför kraftigt ljus, långvarig användning av datorer) och olika mekaniska faktorer (användning av kontaktlinser, postoperativa tillstånd efter ögonoperationer) orsakar.

Hur ska ögondropparna användas?

1 droppe i varje öga, vid behov två eller flera gånger per dag.



Tryck på locket på flaskan och vrid i pilens riktning. Ta bort locket. Håll flaskan upp och ner över ögat, krama lätt om den, och droppa en droppe i varje öga. Kontrollera att inga droppar finns kvar på spetsen och skruva tillbaka locket på flaskan.

Bevita® Eye Pro Hydra ögondroppar är kompatibel med mjuka kontaktlinser.

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Detta preparat är endast avsett för utvärtes och lokalt bruk i ögonen.
- Använd inte detta preparat om flaskan är skadad.
- Använd inte preparatet om du är överkänslig mot något av innehållsämnen.
- Dessa ögondroppar får inte användas efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Undvik att vidröra ögats yta, hud eller några ytor i omgivningen med droppspetsen för att undvika kontaminering.

- Kortvarig dimsyn och en svidande känsla i ögat, som beror på dropparnas viskositet, kan förekomma i sällsynta fall. Vänta tills symptomen gått över innan du utför uppgifter som kräver synskärpa.
- Om du också använder andra ögonpreparat ska du hålla en paus på minst 10-15 minuter mellan appliceringen av Bevita® Eye Pro Hydra ögondroppar och eventuella andra preparat.
- Innehållet i en öppnad flaska ska användas senast inom 90 dagar efter öppnandet.
- Stäng flaskan ordentligt efter varje användning, se till att ingen vätska blir kvar i spetsen. Skaka bort vätskan vid behov med en skarp handledsrörelse.
- Droppa inte mer än 30 droppar i rad att flaskan inte kollapsar.
- Bevita® Eye Pro Hydra ögondroppar flaskan är avsedd för personligt bruk.
- Om irritation eller en brännande känsla uppstår i ögonen, sluta använda produkten och kontakta läkare.
- Om du är gravid eller ammar, rekommenderas att du diskuterar användningen av produkten med din läkare.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvaras vid +2 - +25 °C.
- Ögondropparna får ej sväljas.

Tillverkare: Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italien

Distributör: Orion Oyj, PB 65, 02101 Esbo
Tfn: 010-4261

Denna bipacksedel ändrades senast: juli 2024

Allvarliga incidenter med produkten måste rapporteras till tillverkaren (Farmigea) och tillsynsmyndigheten (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Tfn: 029 522 3341).

Förpackningens symboler:

	Steriliserad med aseptisk teknik		Försiktighet
	Läs bruksanvisningen, www.bevitaeye.fi		Tillverkningsdatum
	Medicinteknisk produkt		Tillverkare
	Temperaturgränser 2°C - 25°C		Distributör
	Används senast den		Översättning
	Satsnummer		Unik produktidentifiering
			Innehållet i en öppnad flaska ska användas inom 90 dagar.

Återvinningsinstruktioner:

- Sortera den yttre förpackningen som kartong
- Sortera bipacksedeln som papper
- Sortera tomma flaskan som plast

CE 0546
S-0015824-1