

Ainesosat: Dinatriumedetaatti, Twin-EdaXyl[®], hyaluronihappo, polyhexanidi 0,0001 % steriilissä, isotonisessa puskuroidussa liuoksessa.

Mikä Bevita[®] Eye piilolinssien hoitonestettä on ja mihin sitä käytetään?

Bevita[®] Eye piilolinssien hoitonestettä on kehitetty kaikkien piilolinssien ja erityisesti silikonihydrogeelinssien puhdistukseen, desinfiointiin, säilytykseen, huuhteluun ja kostutukseen. Hoitonesteen sisältämä innovatiivinen kaksitehoinen Twin-EdaXyl[®] voitelee linssijä sekä päivittäin käytettynä puhdistaa linssien kertyneet epäpuhtaudet. Bioteknisesti valmistettu hyaluronihappo kostuttaa piilolinssijä ja silmiä käytön aikana.

Käyttöohjeet:

Piilolinssit on puhdistettava, huuhdeltava ja desinfioitava päivittäin. Tämä estää mikrobien ja epäpuhtauksien tarttumisen linssihin.

1. Pese, huuhtelee ja kuivaa kätesi huolellisesti.
2. Poista ensin linssi oikeasta silmästä ja aseta se kämmenelle. Kaada linssille hoitonestettä ja hiero linssiä varovasti sormella molemmilta puolilta 10–15 sekunnin ajan.
3. Huuhtelee linssiä huolellisesti runsaalla, tuoreella hoitonestellä. Aseta linssi säilytyskoteloon. Toista samat toimenpiteet vasemmalle linssille.
4. Täytä kotelo merkiviivään asti tuoreella hoitonestellä. Säilytä ja desinfioi linssit tuoreessa nesteessä vähintään neljä tuntia tai yön yli. Huuhtelee piilolinssit tuoreella hoitonestellä aina ennen käyttöönottoa. Ottaessasi linssit käyttöön tyhjennä kotelo, huuhtelee se tuoreella hoitonestellä ja anna kuivua. Älä koskaan käytä samaa nesteannosta uudelleen.

Hoitonestettä säilyy avattuna 4 kuukautta. Mikäli tuotetta on vielä jäljellä 4 kuukautta avaamisen jälkeen, se on heitettävä pois. Käytettävä viimeiseen käyttöpäivään mennessä (katso leima pullossa). Suojaa pullo jäätymiseltä ja auringonvalolta.

Varoitukset ja vasta-aiheet

Piilolinssien turvallinen käyttö edellyttää käyntiä optikolla tai silmälääkärillä. Noudata tarkoin näitä käyttöohjeita sekä optikon tai silmälääkärin antamia erityisohjeita piilolinssien turvalliseen käyttöön ja hoitoon.

- Älä käytä, mikäli olet allerginen jollekin nesteen ainesosalle.
- Älä käytä hoitonesteen omaa säilytyskoteloa, jos olet yliherkkä hopealle.
- Mikäli silmissä ilmenee ärsytystä tai jatkuvia silmäoireita, keskeytä piilolinssien käyttö ja ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin.
- Poista korkin turvarengas pullon ensimmäisen avaamisen yhteydessä. Älä käytä hoitonestettä, mikäli pullo tai turvarengas on vaurioitunut.
- Älä kosketa pullon suuosaa, näin nesteeseen ei pääse epäpuhtauksia.
- Käytä pullosta ottamaasi nesteannosta vain kerran.
- Sulje pullo huolellisesti heti käytön jälkeen ja säilytä huoneenlämmössä (15–30 °C).
- Älä yhdistä tätä hoitonestettä mihinkään toiseen nesteeseen. Ei ole suositeltavaa vaihtaa hoitonestemerkkiä kesken piilolinssien käytävään.
- Älä käytä vesijohtovettä piilolinssien tai linssikotelon käsittelyssä.
- Mikäli piilolinssien käyttöväli on yli kaksi viikkoa, desinfioi linssit tuoreella nesteellä ennen käyttöönottoa (katso käyttöohjeen kohta 4).

- Huolehdi piilolinssikotelon puhtaudesta ja vaihda se säännöllisesti uuteen. Huuhtelee linssikotelo tuoreella hoitonestellä ja anna sen kuivua avoimena ylösalaisin käännettynä.
- Ei lasten ulottuville.
- Tuotteen käyttöön liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle, Oy Finnsusp Ab, quality@piiliset.fi / puh. 02 489110 ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle, puh. 029 522 3341.



Oy Finnsusp Ab, Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto

Jakelija: Orion Oyj, PL 65, 02101 Espoo. Puh: 010-4261

Tämä pakkauseloste on tarkistettu viimeksi: syyskuu 2025

Pakkauksen symbolit:



Lue varoitukset
pakkauselosteesta

LOT

Eränumero,
esitetty pullossa
termin 'LOT'
vieressä



Lue käyttöohjeet,
www.bevitaeye.fi

STERILE A

Steriloitu
aseptisesti



Lämpötilan
raja-arvot

MD

Lääkinnällinen
laite



Suojaa
auringonvalolta



Käytä neljän
kuukauden kuluessa
avaamisesta



Viimeinen
käyttöpäivämäärä,
esitetty pullossa
termin 'EXP'
vieressä



Ei lasten ulottuville
eikä näkyville



Valmistaja

Kierrätysohjeet:



Kierrätä pakkauseloste paperina



Kierrätä kartonkikotelo kartonkina



Kierrätä tyhjä pullo muovina



Kierrätä korkki muovina

Innehållsämnen: Dinatriumedetat, Twin-EdaXyl[®], hyaluronsyra, polyhexanid 0,0001 % i steril isotonisk buffertlösning.

Vad är Bevita[®] Eye kontaktlinsvätska och vad används det för?

Bevita[®] Eye kontaktlinsvätska är för rengöring, desinficering, förvaring, sköljning och återfuktning av särskilt silikonhydrogellinser samt alla mjuka kontaktlinser. Vätskan innehåller innovativt dubbelverkande Twin-EdaXyl[®], som smörjer linser samt vid daglig användning avlägsnar föroreningar. Biologiskt tillverkad hyaluronsyra fuktar kontaktlinser och ögon.

Bruksanvisning:

Kontaktlinserna bör rengöras, sköljas och desinficeras dagligen. Detta förhindrar mikrotillväxt samt att föroreningar fastnar på linserna

1. Tvätta händerna noggrant, skölj och torka omsorgsfullt.
2. Ta först den högra kontaktlinsen från ögat, lägg den på handflatan och håll vätska på linsen. Gnid linsen varsamt på båda ytorerna med fingret i 10-15 sekunder.
3. Skölj linsen grundligt med färsk vätska. Placera linsen i förvaringsbehållaren. Upprepa samma åtgärder med den vänstra linsen.
4. Fyll förvaringsbehållaren till strecket med färsk vätska. Förvara och desinficera kontaktlinserna i färsk vätska i minst fyra timmar eller över natten. Skölj linserna alltid med färsk vätska före användning. Vid användning av linser håll ut vätskan ur behållaren, skölj det med färsk vätska och låt torka. Återanvänd aldrig vätskan.

Vätskan hållbar i 4 månader efter öppning. Kassera flaskan och eventuellt kvarvarande vätska 4 månader efter första öppning. Använd inte produkten efter utgångsdatumet (se utgångsdatum på flaskan). Skydda flaskan från att frysa och direkt solljus.

Varningar och kontraindikationer:

Kontaktlinser kan användas tryggt bara efter en granskning av en optiker eller ögonläkare. Följ noggrant denna bruksanvisning, samt de speciella skötselinstruktionerna som du fått av din optiker eller ögonläkare. Då säkras en trygg användning och skötsel av kontaktlinser.

- Använd aldrig om du är allergisk mot något innehållsämne.
- Om du är allergisk mot silver, använd aldrig vätskans egna behållare.
- Om irritation eller ihållande ögonbesvär uppstår, avbryt användningen av kontaktlinser och kontakta din optiker eller ögonläkare omedelbart.
- Ta bort korkens säkerhetsring när du öppnar flaskan för första gången. Använd inte vätskan om säkerhetsringen eller flaskan är söndrig.
- För att förhindra bakterietillväxt får flasköppningen aldrig vidröras.
- Återanvänd aldrig vätskan.
- Tillslut flaskan noggrant omedelbart efter användningen och förvara i rumstemperatur (15-30 °C).
- Blanda aldrig denna vätska med andra vätskor. Det rekommenderas att inte byta ut skötselvätskemärket inom kontaktlinsens förbrukningstid.
- Använd inte vattenledningsvatten vid behandling av kontaktlinser.
- Ifall kontaktlinserna är oanvända över två veckor, bör en ny desinficering utföras före användning (se bruksanvisningens punkt 4).

- Sköt om förvaringsbehållarens hygien och byt ut förvaringsbehållaren regelmässigt. Skölj behållaren med färsk vätska och låt det torka ut öppet uppochnervänt.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Allvarliga incidenter med produkten måste rapporteras till tillverkaren, Oy Finnsusp Ab, quality@piilose.fi / tfn. 02 489110 och till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea tfn. 029 522 3341.

 Oy Finnsusp Ab, Pääskykalliontie 5, 21420 Lundo

Distributör: Orion Oyj, PB 65, 02101 Esbo. Tfn: 010-4261

Denna bipacksedel ändrades senast: september 2025

Förpackningens symboler:



Läs varningarna i bipacksedeln

LOT

Satsnummer, presenteras på flaskan bredvid termen 'LOT'



Läs bruksanvisningen, www.bevitaeye.fi

STERILE A

Steriliserad med aseptisk teknik



Gränsvärden för förvarings-temperaturerna

MD

Medicinteknisk produkt



Skydd mot solljus



Använd vid 4 månader efter öppnandet



Sista användningsdatum, presenteras på flaskan bredvid termen 'EXP'



Förvaras utom syn- och räckhåll för barn



Tillverkare

Återvinningsinstruktioner:



Sortera bipacksedeln som papper



Sortera den yttre förpackningen som kartong



Sortera tomma flaskan som plast



Sortera korken som plast

S-0016288-1

2640-1