

Ainesosat: Dinatriumedetaatti, Twin-EdaXyl[®], hyaluronihappo, polyhexanidi 0,0001 % sterilisissä, isotonisessa puskuroidussa liuoksessa.

Mikä Bevita[®] Eye piilolinssien hoitoneste on ja mihin sitä käytetään?

Bevita[®] Eye piilolinssien hoitoneste on kehitetty kaikkien piilolinssien ja erityisesti silikonihydrogeelilinssien puhdistukseen, desinfiointiin, säilytykseen, huuhteluun ja kostutukseen. Hoitonesteeseen sisältämä innovatiivinen kaksitehoinen Twin-EdaXyl[®] voitelee linssijä ja päivittäin käytettynä puhdistaa linssihin kertyneet epäpuhtaudet. Bioteknisesti valmistettu hyaluronihappo kostuttaa piilolinssijä ja silmiä käytön aikana.

Käyttöohjeet:

Piilolinssit on puhdistettava, huuhdeltava ja desinfioidava päivittäin. Tämä estää mikrobin ja epäpuhtauksien tarttumisen linssihin.

1. Pese, huuhtelee ja kuivaa kätesi huolellisesti.
2. Poista ensin linssi oikeasta silmästä ja aseta se kämmenelle. Kaada linssille hoitonestettä ja hiero linssiä varovasti sormella molemmilta puolilta 10–15 sekunnin ajan.
3. Huuhtelee linssiä huolellisesti runsaalla, tuoreella hoitonesteellä. Aseta linssi säilytyskoteloon. Toista samat toimenpiteet vasemmalle linssille.
4. Täytä kotelo merkiviivaan asti tuoreella hoitonesteellä. Säilytä ja desinfioidu linssit tuoreessa nesteessä vähintään neljä tuntia tai yön yli. Huuhtelee piilolinssit tuoreella hoitonesteellä aina ennen käyttöönottoa. Ottaessasi linssit käyttöön tyhjennä kotelo, huuhtelee se tuoreella hoitonesteellä ja anna kuivua. Älä koskaan käytä samaa nesteannosta uudelleen.

Hoitoneste säilyy avattuna 4 kuukautta. Mikäli tuotetta on vielä jäljellä 4 kuukautta avaamisen jälkeen, se on heitettävä pois. Käytettävä viimeiseen käyttöpäivään mennessä (katso leima pullossa). Suojaa pullo jäämystalvalta ja auringonvalolta.

Varoitukset ja vasta-aiheet

Piilolinssien turvallinen käyttö edellyttää käyntiä optikolla tai silmälääkärillä. Noudata tarkoin näitä käyttöohjeita sekä optikon tai silmälääkärin antamia erityisohjeita piilolinssien turvalliseen käyttöön ja hoitoon.

- Älä käytä, mikäli olet allerginen jollekin nesteen ainesosalle.
- Älä käytä hoitonesteeseen omaa säilytyskoteloa, jos olet yliherkkä hopealle.
- Mikäli silmissä ilmenee ärsytystä tai jatkuvia silmäoireita, keskeytä piilolinssien käyttö ja ota yhteys optikkoon tai silmälääkärin.
- Poista korkin turvarengas pullon ensimmäisen avaamisen yhteydessä. Älä käytä hoitonestettä, mikäli pullo tai turvarengas on vaurioitunut.
- Älä kosketa pullon suuosaa, näin nesteeseen ei pääse epäpuhtauksia.
- Käytä pullosta ottamaasi nesteannosta vain kerran.
- Sulje pullo huolellisesti heti käytön jälkeen ja säilytä huoneenlämmössä (15–30 °C).
- Älä yhdistä tätä hoitonestettä mihinkään toiseen nesteeseen. Ei ole suositeltavaa vaihtaa hoitonestemerkkiä kesken piilolinssien käytövälin.
- Älä käytä vesijohtovettä piilolinssien tai linssikotelon käsittelyssä.
- Mikäli piilolinssien käyttöväli on yli kaksi viikkoa, desinfioidu linssit tuoreella nesteellä ennen käyttöönottoa (katso käyttöohjeen kohta 4).

- Huolehdi piilolinssikotelon puhtaudesta ja vaihda se säännöllisesti uuteen. Huuhtelee linssikotelo tuoreella hoitonesteellä ja anna sen kuivua avoimena ylösalaisin käännettynä.
- Ei lasten ulottuville.
- Tuotteen käyttöön liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle, Oy Finnsusp Ab, quality@piiliset.fi / puh. 02 489110 ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle, puh. 029 522 3341.



Oy Finnsusp Ab, Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto

Jakelija: Orion Oyj, PL 65, 02101 Espoo. Puh: 010-4261

Tämä pakkauseloste on tarkistettu viimeksi: syyskuu 2025

Pakkauksen symbolit:



Lue varoitukset pakkauselosteesta



Eränumero, esitetty pullossa termin 'LOT' vieressä



Lue käyttöohjeet, www.bevitaeye.fi



Lämpötilan raja-arvot



Steriloitu



Suojaa auringonvalolta



Lääkinnällinen laite



Käytä neljän kuukauden kuluessa avaamisesta



Viimeinen käyttöpäivämäärä, esitetty pullossa termin 'EXP' vieressä



Ei lasten ulottuville eikä näkyville



Valmistaja

Kierrätysohjeet:



Kierrätä pakkauseloste paperina



Kierrätä kartonkikotelo kartonkina



Kierrätä tyhjä pullo muovina



Kierrätä korkki muovina

Innehållsämnen: Dinatriumedetat, Twin-EdaXyl®, hyaluronsyra, polyhexanid 0,0001 % i steril isotonisk buffertlösning.

Vad är Bevita® Eye kontaktlinsvätska och vad används det för?

Bevita® Eye kontaktlinsvätska är för rengöring, desinficering, förvaring, sköljning och återfuktning av särskilt silikonhydrogel-linser samt alla mjuka kontaktlinser. Vätskan innehåller innovativt dubbelverkande Twin-EdaXyl®, som smörjer linser samt vid daglig användning avlägsnar föroreningar. Biologiskt tillverkad hyaluronsyra fuktar kontaktlinser och ögon.

Bruksanvisning:

Kontaktlinserna bör rengöras, sköljas och desinficeras dagligen. Detta förhindrar mikrotillväxt samt att föroreningar fastnar på linserna

1. Tvätta händerna noggrant, skölj och torka omsorgsfullt.
2. Ta först den högra kontaktlinsen från ögat, lägg den på handflatan och håll vätska på linsen. Gnid linsen varsamt på båda ytorerna med fingret i 10-15 sekunder.
3. Skölj linsen grundligt med färsk vätska. Placera linsen i förvaringsbehållaren. Upprepa samma åtgärder med den vänstra linsen.
4. Fyll förvaringsbehållaren till strecket med färsk vätska. Förvara och desinficera kontaktlinserna i färsk vätska i minst fyra timmar eller över natten. Skölj linserna alltid med färsk vätska före användning. Vid användning av linser håll ut vätskan ur behållaren, skölj det med färsk vätska och låt torka. Återanvänd aldrig vätskan.

Vätskan hållbar i 4 månader efter öppning. Kassera flaskan och eventuellt kvarvarande vätska 4 månader efter första öppning. Använd inte produkten efter utgångsdatumet (se utgångsdatum på flaskan). Skydda flaskan från att frysa och direkt solljus.

Varningar och kontraindikationer:

Kontaktlinser kan användas tryggt bara efter en granskning av en optiker eller ögonläkare. Följ noggrant denna bruksanvisning, samt de speciella skötselinstruktionerna som du fått av din optiker eller ögonläkare. Då säkras en trygg användning och skötsel av kontaktlinser.

- Använd aldrig om du är allergisk mot något innehållsämne.
- Om du är allergisk mot silver, använd aldrig vätskans egna behållare.
- Om irritation eller ihållande ögonbesvär uppstår, avbryt användningen av kontaktlinser och kontakta din optiker eller ögonläkare omedelbart.
- Ta bort korkens säkerhetsring när du öppnar flaskan för första gången. Använd inte vätskan om säkerhetsringen eller flaskan är sönder.
- För att förhindra bakterietillväxt får flasköppningen aldrig vidröras.
- Återanvänd aldrig vätskan.
- Tillslut flaskan noggrant omedelbart efter användningen och förvara i rumstemperatur (15-30 °C).
- Blanda aldrig denna vätska med andra vätskor. Det rekommenderas att inte byta ut skötselvätskemärket inom kontaktlinsens förbrukningstid.
- Använd inte vattenledningsvatten vid behandling av kontaktlinser.
- Ifall kontaktlinserna är oanvända över två veckor, bör en ny desinficering utföras före användning (se bruksanvisningens punkt 4).

- Sköt om förvaringsbehållarens hygien och byt ut förvaringsbehållaren regelmässigt. Skölj behållaren med färsk vätska och låt det torka ut öppet uppochnerivert.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Allvarliga incidenter med produkten måste rapporteras till tillverkaren, Oy Finnsusp Ab, quality@piilaset.fi / tfn. 02 48910 och till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea tfn. 029 522 3341.



Oy Finnsusp Ab, Pääskykalliontie 5, 21420 Lundo

Distributör: Orion Oyj, PB 65, 02101 Esbo. Tfn: 010-4261

Denna bipacksedel ändrades senast: september 2025

Förpackningens symboler:



Läs varningarna i bipacksedeln



Satsnummer, presenteras på flaskan bredvid termen 'LOT'



Läs bruksanvisningen, www.bevitaeye.fi



Steriliserad med aseptisk teknik



Gränsvärden för förvarings-temperaturerna



Medicinteknisk produkt



Skydd mot solljus



Använd vid 4 månader efter öppnandet



Sista användningsdatum, presenteras på flaskan bredvid termen 'EXP'



Förvaras utom syn- och räckhåll för barn



Tillverkare

Återvinningsinstruktioner:



Sortera bipacksedeln som papper



Sortera den yttre förpackningen som kartong



Sortera tomma flaskan som plast



Sortera korken som plast

S-0016289-1

2639-1