

## KOSTEUTTAVAT JA VOITELEVAT SILMÄTIPAT

Sisältää 0,4 % hyaluronihappoa ja 0,2 % TS-polysakkaridia  
20 x 0,5 ml luosta uudelleen suljettavissa pipeteissa  
Säilöntäaineeton ja fosfaattiton

### Patentoitu koostumus

**Koostumus:** Hyaluronihappo 0,4 %, TS-polysakkaridi 0,2 %, mannitoli, natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, injektioneesteisiin käytettävä vesi.

### Mitä Bevita Eye Pro -silmätipat ovat?

Bevita Eye Pro on säilöntäaineeton, fosfaattiton, kosteuttava ja voiteleva silmätippaliuos. Liuoksen sisältämä hyaluronihappo suojaa ja voitelee silmän pintaa. TS-polysakkaridi suojaa ja tasapainottaa kyynelfilmiä.


### Bevita Eye Pro -pakkaus

Bevita Eye Pro -silmätippoja on saatavana 20 uudelleen suljettavaa pipettiä sisältävinä pakkauksina. Yhdessä pipetissä on luosta 0,5 ml.

### Mihin Bevita Eye Pro -silmätipat on tarkoitettu?

Bevita Eye Pro voitelee ja suojaa silmän pintaa sekä lievittää pitkäkestoisesti kuivasilmäisyyden oireita. Silmätippaliuos sisältää TS-polysakkaridia ja korkean molekyylipainon omaavaa hyaluronihappoa, jota valmistetaan bioteknologisen synteessin avulla. Hyaluronihappo on kehon voitelevissa nesteissä esiintyvä aine. Viskositeettinsa ansiosta sillä on optimaalisesti silmää voitelevat ominaisuudet, silmää kosteuttava ja kyynelfilmiä stabiloiva vaikutus. TS-polysakkaridi on luonnosta peräisin oleva aine, joka eristetään *Tamarindus indica* -kasvin siemenistä. Sillä on sarveiskalvon ja sidekalvon pintaa suojaava vaikutus. TS-polysakkaridi muodostaa suojaavan kalvon silmän pinnalle, mikä auttaa palauttamaan kyynelfilmin ja silmän pinnan fysiologisen tasapainon. Näiden kahden aineen seoksella on sarveiskalvon ja sidekalvon kohdistuvat synergistiset vaikutukset, jotka tarjoavat silmille suojan ympäristötekijöiden (tuuli, aurinko, savu, kuiva ilma), silmiin kohdistuvan stressin (liian voimakas valo, tietokoneet) ja mekaanisten tekijöiden (piilolinssit, silmäleikkauksen jälkitila) aiheuttamaa ärsytystä vastaan. Silmätippojen pitoisuudet on säädetty niin, että ne voitelevat myös hyvin voimakkaiden epämuikavuusoireiden yhteydessä. Bevita Eye Pro -silmätipat ovat säilöntäaineettomia, ja ne soveltuvat käytettäväksi piilolinssien kanssa.

### Kuinka silmätippoja käytetään ja kuinka paljon?

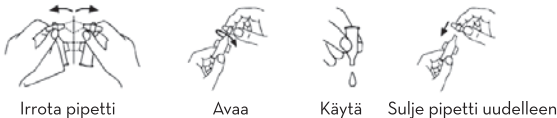


- Avaa alumiinipussi ja irrota yksi pipetti rivistä.
- Avaa pipetti kiertämällä ja nostamalla kärkikans pois.
- Tiputa yksi tippa silmään puristamalla pipettiä kevyesti. Annostele valmistetta tarpeen mukaan kerran tai useita kertoja päivässä.

Bevita Eye Pro -silmätipat toimitetaan uudelleen suljettavissa pipeteissa. Avatun pipetin sisältö on käytettävä 12 tunnin kuluessa sen ensimmäisestä avaamisesta.

### Varoitukset ja varotoimet

- Valmiste on tarkoitettu vain ulkoiseen ja paikalliseen käyttöön silmissä.
- Älä käytä silmätippaliuosta, jos pakkaus tai pipetti on vaurioitunut.
- Älä käytä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin sen sisältämälle aineelle.
- Valmistetta ei saa käyttää pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Varo koskettamasta silmän pintaa pipetin kärjellä.
- Harvoissa tapauksissa näkökenttä voi tilapäisesti sumentua tippojen laiton jälkeen. Tämä johtuu liuoksen viskositeetista. Odota, että näkö on jälleen kirkas ennen kuin ryhdyt tarkkaa näkökykyä vaativiin tehtäviin.
- Pidä vähintään 10-15 minuutin väli Bevita Eye Pro -silmätippojen laiton jälkeen ennen kuin annostelet jotakin muuta silmävalmistetta silmiin.
- Avatun pipetin sisältö on käytettävä 12 tunnin kuluessa sen ensimmäisestä avaamisesta.
- Säilytettävä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.
- Säilytettävä +2-+25 °C:ssa
- Valmistetta ei saa niellä.

### Pakkauksen symbolit:

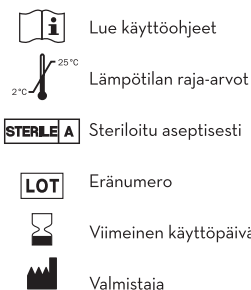

**Valmistaja:**  
Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italia

**Markkinoija:**  
Orion Pharma, PL 65, 02101 Espoo. Puh: 010-4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: Toukokuu 2017  
[www.itsehoitoapteekki.fi](http://www.itsehoitoapteekki.fi)



## FUKTANDE OCH SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Innehåller 0,4 % hyaluronsyra och 0,2 % TS-polysackarid  
20 x 0,5 ml lösning i återförslutningsbara pipetter  
Utan konserveringsmedel och fosfater

### Patenterad komposition

**Innehållsämnen:** Hyaluronsyra 0,4 %, TS-polysackarid 0,2 %, mannitol, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, vatten för injektionsvätskor.

### Vad är Bevita Eye Pro ögondroppar?

Bevita Eye Pro är återfuktande och smörjande ögondroppar i form av en lösning som är fri från konserveringsmedel och fosfater. Lösningen innehåller viskös, skyddande och smörjande hyaluronsyra samt skyddande och balanserande TS-polysackarid.

### Bevita Eye Pro förpackningens beskrivning

Bevita Eye Pro ögondroppar finns i förpackningar med 20 återförslutningsbara pipetter, varav varje pipett innehåller 0,5 ml lösning.

### Vad används Bevita Eye Pro ögondroppar för?

Bevita Eye Pro smörjer och skyddar ögats yta samt ger en långvarig lindring av olika symtom. Ögondropparna innehåller TS-polysackarid och stormolekylär hyaluronsyra som tillverkas på bioteknologisk väg. TS-polysackarid är ett naturligt ämne som utvinns ur växten *Tamarindus indicas* frön. Detta ämne skyddar ytan hos ögats horn- och bindehinna. TS-polysackariden bildar en skyddande hinna på ögats yta, vilken hjälper till att återställa ögats tårfilm och ytans normala fysiologiska balans. De synergistiska effekter, som blandningen av dessa två ämnen innehar på ögats horn- och bindehinna, erbjuder ögonen ett skydd mot den irritation som olika faktorer i omgivningen (vind, sol, rök, torr luft), olika stressmoment (alltför kraftigt ljus, datorer) och olika mekaniska faktorer (kontaktlinser, postoperativa tillstånd efter ögonoperationer) orsakar. Halterna av de olika ämnena i lösningen har valts så att dropparna förmår smörja ögonen också i samband med mycket kraftiga obehagssymtom. Dessa ögondroppar är fria från konserveringsmedel och de lämpar sig för bruk tillsammans med kontaktlinser.

### Hur ska ögondropparna användas och hur många droppar ska man applicera?



Lösgör en pipett



Oppna



Använd



Återförslut pipetten

- Öppna skyddspåsen av aluminium och lösgör en pipett ur raden.
- Öppna pipetten genom att skriva och lyfta av toppen.
- Applicera en droppe i ögat genom att klämma lätt på pipetten. Dosera ögondropparna en eller flera gånger per dag enligt behov.

Bevita Eye Pro ögondropparna är förpackade i återförslutningsbara pipetter. Innehållet i en öppnad pipett ska användas inom 12 timmar efter att pipetten öppnats för första gången.

### Varningar och försiktighetsåtgärder

- Detta preparat är endast avsett för utvärtes och lokalt bruk i ögonen.
- Använd inte ögondropparna om förpackningen eller pipetten ser ut att vara skadade på något vis.
- Använd inte detta preparat om du är överkänslig mot något av innehållsämnen.
- Ögondropparna ska användas före det utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Undvik att vidröra ögats yta med pipettens spets.
- I sällsynta fall kan dropparna orsaka tillfällig dimsyn. Detta beror på lösningens viskositet ("seghet", trögflytande vätska). Vänta tills ditt synfält är klart igen innan du utför uppgifter som kräver skarp syn.
- Håll en paus på minst 10 - 15 minuter efter att du applicerat dessa droppar innan du doserar eventuella andra produkter i ögonen.
- Innehållet i en pipett ska användas inom 12 timmar efter att pipetten öppnats för första gången.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvaras vid +2 - +25 °C.
- Ögondropparna får inte sväljas.

### Förpackningens symboler:



Läs instruktionerna



Kassera på säkert sätt efter användning



Gränsvärden för förvaringstemperaturerna

### Tillverkare:

Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italien



Steriliserad med aseptisk teknik

### Marknadsförs av:

Orion Pharma, PB 65, 02101 Esbo, Tfn: 010-4261



Batchnummer

Denna bipacksedel ändrades senast: Maj 2017

[www.itsehoitoapteekki.fi](http://www.itsehoitoapteekki.fi)



Sista användningsdatum



Tillverkare



0546

A-0101319-01-1