



Licevex® TÄISHAMPOO

Toimenpidepakkauksen käyttöohje: Licevex® täishampoo + täikampa

Licevex® täishampoo	
Licevex® täishampoo   Lääkinnällinen laite	TÄIKAMPA   Lääkinnällinen laite

Täisuoja sisältävä shampoo
täiden häätöön ja ehkäisyyn

Tappaa täit ja saivareet Ehkäisee uudet täitartunnat

Ainutlaatuinen yhdistelmä: ihanteellinen käyttökävyys
ja taattu teho täitä ja saivareita vastaan

- Nopeavaikutteinen:
tehoa jo 15 minuutissa (kliinisesti osoitettu teho).
- Yksi hoitokerta riittää.
- Valmistetta ei tarvitse jättää hiuksiin pitkäksi aikaa eikä yön yli.
- Silikoniton: helppo pestä pois hiuksista.
- Ei sisällä hyönteismyrkkyä.
- Helppo levittää hiuksiin käytännöllisellä annostelukärjellä.
- Pesee hiukset pehmeiksi ja kiiltäviksi.
- Sisältää LPF®-täisuojan (pitää täit loitolla).
- Suojaa jopa kolme päivää.
- Sopii 1-vuotiaasta alkaen.
- Ei sovellu käytettäväksi raskauden eikä imetyksen aikana.
- Miellyttävä tuoksu.
- Pakkaus sisältää täikamman.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Miten Licevex® täishampoota käytetään?



**Jos käsittelet omia hiuksiasi, ole varovainen,
ettei shampooa pääse valumaan silmiin.
Kallista päätt taaksepäin.**

VAIHE 1: Levitä shampoo hiuksiin

Levitä **Licevex® täishampoota** kuiviin hiuksiin peittäen huolellisesti hiusten koko pituuden sekä päänahan. Suojaa silmät ja iho pyyhkeellä. Hiero shampoo hiuksiin tyvestä alkaen. Kiinnitä erityistä huomiota korvantauksiin ja niskan hiusrajaan. Jätä shampoo hiuksiin 15 minuutiksi (**älä pidemmäksi aikaa**). Älä peitä hiuksia. (Valmisteen levämistä kaikkialle hiuksiin auttaa, jos kampaat hiukset heti shampooon levittämisen jälkeen.) Jos hiukset ovat pitkät, kiinnitä ne niin, etteivät ne kosketa ihoa shampooon levittämisen jälkeen.

VAIHE 2: Pese hiukset

Kun 15 minuuttia on kulunut, lisää hiuksiin hieman vettä, jotta voit vaahdottaa shampooon. **Huuhtele hiukset huolellisesti** runsaalla haalealla vedellä. Toista tarvittaessa, jotta kaikki shampoo huuhtoutuu pois. Kuivaa hiukset pyyhkeellä (**älä käytä** hiustenkuivaajaa, sillä kuuma ilma voi pahentaa päänahan ärsytystä). Hoitoaineen käyttö täishampookäsittelyn jälkeen helpottaa hiusten kampaamista.

VAIHE 3: Kampaa hiukset täikammalla

Kampaa hiukset täikammalla poistaaksesi täit ja saivareet. Jaa hiukset osioihin ja kampaa yksi osio kerrallaan. Aseta kamman piikit mahdollisimman lähelle päänahkaa ja kampaa päänahasta pois päin hiusten latvoihin asti. Kiinnitä kampaamisen jälkeen osio hiussoljella sivuun. Puhdista kampaa käytön aikana pyyhkimällä se paperipyyhkeeseen. Hävitä pyyhe laittamalla se suljettavaan pussiin ja heitä suljettu pussi pois.

Älä käytä hiustenkuivaajaa. Tutki hiukset päivittäin 7 päivän ajan. Toista hoito tarvittaessa.

Parhaan mahdollisen suojan saavuttamiseksi vältä liiallista hiusten pesemistä tavallisella shampooolla ja hiusten pitkäkestoista altistamista vedelle 72 tunnin ajan täishampookäsittelyn jälkeen.

YLEISTÄ

Mitä Licevex® täishampoota on?

Licevex® täishampoo on läpinäkyvä liuos, joka sisältää tätä tarkoitusta varten kehitettyä erikoisöljyä ja LPF®-täisuoja. Valmisteen polymeeriöljy tarjoaa maksimaalisen tehon päätäihin. Shampoo on kaksivaikutteinen: se tukkii näin hengitysaukot ja kuivattaa ja käpristää sen nahan. Licevex® täishampoo ei sisällä hyönteisten hermostoon vaikuttavia hyönteismyrkkyjä, joten vastustuskyvyn kehittymisen vaaraa ei ole. Licevex® täishampoo ei sisällä silikonია (dimetikonia), joten hiuksiin ei jää rasvaisia jäämiä. Licevex® täishampoo sisältää LPF®-täisuoja, joka suojaa uusilta täitartunnoilta vaikkeuttamalla täiden kiinnittymistä hiuksiin. Kun hiukset käsitellään Licevex® täishampooilla, uusien täitartuntojen todennäköisyys pienenee.

Miten Licevex® täishampoo suojaa uusilta täitartunnoilta?

LPF®-täisuoja on polymeeriä (akrylaattia) ja öljyliukoisia aineita sisältävä valmiste, joka vaikuttaa hiuksen pintaan niin, että täiden on vaikeampi tarttua hiuksiin. Tutkimusten mukaan käsittely Licevex® täishampooilla pienentää todennäköisyyttä, että täit pysyvät hiusten tai ihon pinnalla.

Milloin Licevex® täishampoota käytetään?

Kun epäilet täitartuntaa: Käytä Licevex® täishampoota. Kun haluat suojautua uusilta täitartunnoilta: Licevex® täishampoota voidaan käyttää säännöllisesti täitartuntojen ennaltaehkäisyyn.



VAROITUKSET



VÄLTÄ SHAMPOON JOUTUMISTA SILMIIN.

Valmisteen sisältämät saippuat ärsyttävät voimakkaasti silmiä. Jos valmistetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät heti huolellisesti vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Jos joku on vahingossa niellyt tai hengittänyt valmistetta, ota yhteys lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen.



SYTTYMISVAARA: Pidä shampooa käsitelty

hiukset poissa tulen, liekkien ja kuumien esineiden (esim. kynttilät, takka, hiustenkuivaaja, hella) lähetytyiltä. Älä koskaan tupakoi, kun käsittelet shampooa omia tai toisen hiuksia.

- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Älä käytä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin sen aineosalle. Älä käytä valmistetta, jos päänahka on hyvin ärtynyt tai siinä on ihovaurioita. Jos ilmenee ihottumaa tai ärsytys- tai allergiaoireita, lopeta shampooon käyttö ja pese hiukset tavallisella shampooalla.
- Jos täitä on paljon (> 25 täitä/pää), käsittely on ehkä toistettava useita kertoja.
- Vältä valmisteen joutumista limakalvoille (suuhun ja nenään).
- Varmista, että peset shampooon huolellisesti pois hiuksista (sekä ihoalueilta, jotka joutuivat kosketuksiin valmisteen kanssa).
- Jätä shampoo aina hiuksiin 15 minuutiksi (**älä pidemmäksi aikaa**).
- Älä peitä hiuksia shampookäsittelyn aikana (esimerkiksi suihkumyssyllä tai alumiinifoliolla).
- Kiedo hartiaille pyyhe, jotta valmistetta ei pääse tippumaan iholle (kaulalle, hartiolle ja rintakehälle). Jos valmistetta joutuu iholle, pese se pois saippualla.
- Jos käytät valmistetta illalla, varmista, että hiukset ovat täysin kuivat ennen nukkumaanmenoa.
- Vain ulkoiseen käyttöön.

HAITTAVAIKUTUKSET

Licevex® täishampoo on hyvin siedetty ohjeenmukaisessa käytössä. Harvoissa tai hyvin harvoissa tapauksissa voi esiintyä seuraavia haittatapahtumia:

- Ihottumaa ja ihoärsytystä
- Tilapäistä hiustenlähtöä ja vaurioitumista
- Lievää silmäluomien turvotusta tai silmien kirvelyä
- Päänahan kesimistä
- Harvinaisissa tapauksissa voi esiintyä voimakasta silmien ärsytystä. Varmista, ettei valmistetta pääse silmiin (esimerkiksi peittämällä silmät pyyhkeellä).

Valmisteeseen liittyvät epäillyt vaaratilanteet ja valitukset pyydetään ilmoittamaan valmistajalle osoitteen www.licevex.fi kautta, sillä ilmoittaminen on tärkeää valmisteen hyöty-riskisuhteen jatkuvan seurannan kannalta. Valmisteeseen liittyvät epäillyt vakavat vaaratilanteet pyydetään ilmoittamaan valmistajalle osoitteen www.licevex.fi kautta sekä kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, puh. 029 522 3341).

VASTA-AIHEET

Valmisteen käytöstä raskauden tai imetyksen aikana ei ole tietoja. Jos saat täitartunnan raskauden tai imetyksen aikana, kysy neuvoa lääkäriltä. Valmistee sopii vain päätäiden (ei satiaisten eikä vaateäiden) häätöön ja ehkäisyyn.

Ei alle 12 kuukauden ikäisille lapsille.

KOOSTUMUS

Hydrogenoitu didekeeni, MIPA Laureth Sulphate, Laureth-4, Cocamide DEA, LPF® (seesamiöljy, akrylaattikopolymeeri, hajuste)

SÄILYTYS

Säilytä 5 °C–25 °C:ssa valolta suojattuna.

Saatavana olevat pakkauksoot:

Toimenpidepakkkaus: 1 plo Licevex® täishampoo, 100 ml  (lääkinnällinen laite, **CE**  Oystershell NV) + täikampa (lääkinnällinen laite, **CE**  Oystershell NV)

Toimenpidepakkkaus: 1 plo Licevex® täishampoo, 250 ml  (lääkinnällinen laite, **CE**  Oystershell NV) + täikampa (lääkinnällinen laite, **CE**  Oystershell NV)

Toimenpidepakkausten pakkaaja:

Oystershell NV
Nijverheidsweg 10
9820 Merelbeke-Melle
Belgia

Älä käytä valmistetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Tämä käyttöohje on päivitetty viimeksi **heinäkuussa 2024**



Orion Oyj
PL 65
02101 Espoo
Suomi
Puh: 010-4261
www.licevex.fi

OHJEET HÄVITTÄMISEEN

Valmistetta ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Vie tarpeeton valmiste apteekkiin hävitettäväksi. Näin menetellen suojelet luontoa.

Symbolien selitykset



Säilytyslämpötila



Varoitus



SYTTYMISVAARA



Lajittele käyttöohje paperina



Lääkinnällinen laite



Valmistaja



Eränumero



Säilytä lämmöltä ja suoralta auringonvalolta suojattuna



Lue käyttöohje



Lajittele täikampa sekajätteenä



Viimeinen käyttöpäivämäärä



Silmäterveyttä koskeva varoitus



Jakelija



Lajittele pullo muovina



Yksilöllinen laitetunniste
(01) Laitetunniste
(10) Eränumero
(17) Viimeinen käyttöpäivämäärä

